

Artikel Nr. 1-57844  
EAN 4260301057844  
Produkt

**Metallwandkasten CB2, universal für alle Defibrillator-Typen, weiß für Innenbereiche mit Alarm**



Zur Defibrillator-Aufbewahrung in Innenbereichen für unterschiedliche Defibrillator-Typen. Stabile Konstruktion mit Türgriff und integriertem Alarm. Machen Sie den Defibrillator-Standort gut erkennbar, zum Beispiel mit reflektierendem Winkelschild.

Merkmale / im Lieferumfang enthalten:

- Passend für Defibrillatoren (AED) unterschiedlicher Hersteller
- Akustischer Türalarm mit 80 dB (separater Alarmaufkleber liegt bei)
- 2 Jahre Garantie
- Versenkter Griff, verdeckte Scharniere
- Magnetischer Türverschluss
- 0,8 mm Stahlblech, pulvereloxiert
- Defibrillator-Standortaufkleber
- Befestigungsmaterial mit 2 St. Schlüsseln zur Alarmaktivierung oder -deaktivierung
- Größe: 210 mm x 370 mm x 400 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- 9 V Blockbatterie
- Kostenlose Defi-Standortregistrierung auf globaler App CISALI

**Installationshinweise:**

Standardmäßig wird der Schrank ohne aktivierten Alarm geliefert. Durch das Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn kann der Alarm aktiviert werden. Sobald die Schranktür geöffnet wird, ertönt der Alarm und stoppt, wenn die Tür wieder geschlossen ist.

Wählen Sie einen geeigneten, gut erreichbaren und markierten Standort für Ihren Defibrillator aus. Die optimale Installationshöhe liegt bei 1,60 m (Unterkante des Wandkastens). Markieren Sie die Bohrlöcher und überzeugen Sie sich, dass sich keine Rohrleitung oder elektrische Kabel in der Wand befinden.

Dübel einführen, Wandschrank ausrichten und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Alarm wie zuvor beschrieben aktivieren. Überprüfen Sie die Alarmfunktion in regelmäßigen Abständen und tauschen Sie, falls erforderlich, die 9 V Batterie aus.

**WEEE-Hinweis:**

Batterien niemals im Hausmüll entsorgen! Bitte bringen Sie diese zum Wertstoffhof oder senden uns diese kostenfrei zurück.